


ナチュラル・アコーディオン シリーズ フランジ(面板)の貼付方法

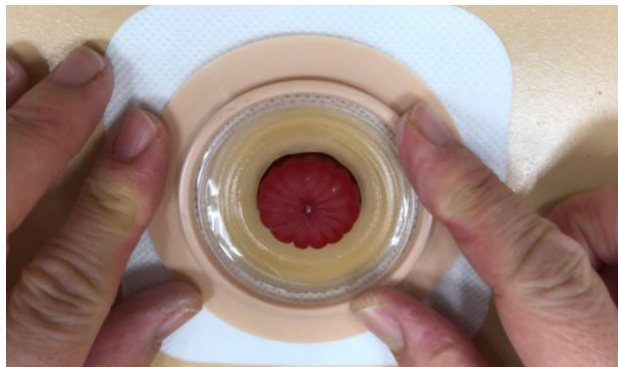

- ① 面板の穴をストーマに合わせてあて、大きさが合っていることを確認します




- ② 面板中央の、ドーナツ形になっている皮膚保護剤のはくり紙をはがします



- ③ ストーマが面板の穴の中央にくるよう確認しながら、面板をお腹に貼ります



- ④ 面板の、ストーマ周辺部分を指でおさえ、面板をお腹にしっかりと密着させます

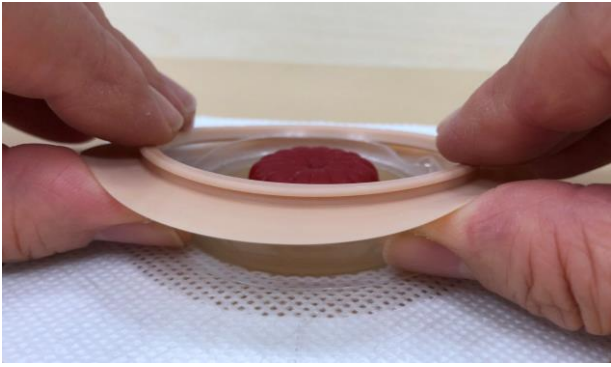

⑤ 面板の嵌合のひだと、テープの間に指を差し込み、透明の蛇腹(リフター)がお腹から浮くようにします



⑥ 面板とストーマ袋の、それぞれの嵌合部を合わせます



⑦ 人差し指と親指ではさんで押しながら、円周に沿ってパチパチと嵌め合わせます



⑧ 面板の外側のはくり紙をはがし、テープをお腹に貼ります

©2019 ConvaTec Inc.