

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ(シリコンベース)

1. 使用方法

- 個包装を開封し、シートを取り出して広げてください。
- 皮膚に残った粘着剤をシートでこすり、取り除きます。
- 本品は数秒で乾燥するので、乾燥後被覆材や装具を貼付しても粘着に影響を及ぼしません。

内容物：シロキサソ

2. 注意

- 本品は必ず上記の説明に従って使用してください。
- 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位(眼、口、耳、鼻、膣など)には使用しないでください。
- アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
- 本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。



高引火性

3. 輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口 ☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

AP5.2022.OC093
001113

423281