


# アクティブライフ<sup>®</sup> 術後用パウチS

## ワンピースシステム

### 使用説明書

⚠️ 使用前にこの説明書をよくお読み下さい。

② ディスポーザブル製品です。

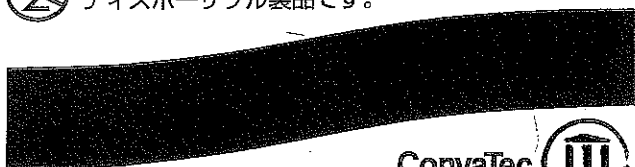

ConvaTec

### 使用説明書

#### 製品の概要

- アクティブライフワンピースシステムは、ストーマ周囲接着部に優れた皮膚保護剤を使用した一品型のストーマ装置です。
- 皮膚保護剤がパウチに付いていますので、簡単に装着できます。

#### アクティブライフ 術後用パウチSの特長

- 優れた皮膚保護剤を使用した下部開放型の透明なパウチです。
- パウチの装着がすばやくできます。
- 防臭性の高い積層プラスチックフィルムを使用しており、不快臭を効果的に遮断します。
- 幅の広いオープンエンドパウチなので、装着時でもストーマのケアが可能です。
- 皮膚保護剤のストーマホールをストーマのサイズに合わせて切って、最大70mmまでのストーマに使用できます。

#### 警告

平らなウロストーマの周囲に粘着剤付の製品を貼付すると、特に尿管が大きくリザーバーがない場合には、まれに、尿路系内において粘着剤の存在が臨床的に報告されることがあります。粘着剤が多量に検出された場合は、製品の継続的な使用を見合わせ、医師の診断を受ける必要があります。

#### 使用方法

##### 皮膚の準備

パウチを貼る前にストーマ周囲の皮膚をよく洗って油分やべたつきを取り除き、水分をふき取って下さい。

##### パウチの装着

1. メジャーリング ガイドでストーマの大きさを測って下さい(図1)。

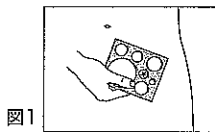


図1

2. 皮膚保護剤に穴を開けるときにパウチも一緒に切らないように、パウチの表と裏を図2のように離して下さい。

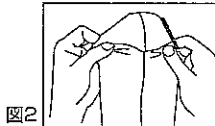


図2

3. 剥離紙上に印刷したガイドラインを使って皮膚保護剤の中央にストーマ基部周囲より2~3mm大きく穴を開けて下さい(図3)。

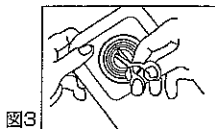


図3

注意：一番外側のガイドラインより外は切らないで下さい。

4. 皮膚保護剤の剥離紙をはがして下さい(図4)。

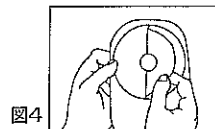


図4

5. 開けた穴をストーマに合わせて皮膚保護剤を貼付し(図5)、特にストーマ周囲に注意しながら皮膚保護剤を軽く押し、よくなでつけるようにして密着させて下さい(図6)。

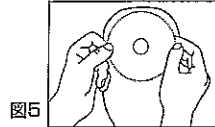


図5

注意：1. 必要に応じて皮膚保護剤の周りをテープで固定して下さい。  
2. パウチの開口部は付属の輪ゴムまたは市販のダブルクリップ等で閉じて下さい。

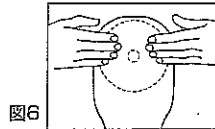


図6

#### パウチのはがし方

片方の手で皮膚を押さえながら、皮膚保護剤の端を持ち、ゆっくりと丁寧にはがして下さい(図7)。

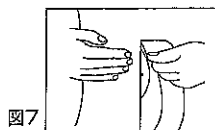


図7

注意：パウチを交換するときに皮膚保護剤がわずかに皮膚に付着したまま残ることがありますが、これは必ずしも完全に取ってしまう必要はありません。

#### 使用上の注意

- 皮膚保護剤やパウチの材質が肌に合わない方は使用を控え、医師または看護師に相談して下さい。
- 本品を貼付したまま高温の風呂に長時間入ることはさけて下さい。
- 本品を貼る部分に軟膏類を塗ると粘着力が低下することがあります。
- 本品は通常連続して貼付できますが、その期間は気温、体温または排泄物の量や質によって異なりますので、交換の時期については十分に注意して下さい。
- パウチを処分するときは、必ず中身をトイレに捨ててから、ゴミとして出して下さい。トイレが詰まる原因となりますので、トイレには流さないで下さい。ゴミの分別は各自治体の方針に従って下さい。

#### 保存上の注意

- 室温で保存し、高温多湿および直射日光をさけて下さい。
- 冷蔵庫に入れて保存しないで下さい。

#### 規格と注文番号

	商品名	規格	注文番号
	アクティブライフ 術後用パウチS 10枚/箱	有効径 19mm-70mm	APS7010

ConvaTec

<http://www.convatec.com>

輸入販売元  
コンバテック ジャパン株式会社  
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号  
お客様相談窓口  
0120-532384