

バリケア® パウダー

使用説明書

ConvaTec 

使用説明書



ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。

保存上の注意



室温で保存し、高温や直射日光を避けてください。
冷蔵庫に入れて保存しないでください。

LOT

製造番号を示します。

製品の概要

バリケア パウダーは、滲出物や排泄物から皮膚を保護する粉状皮膚保護剤です。ストーマやストーマ周囲皮膚と皮膚保護剤の間の小さなすきまを埋めるために使用します。

使用方法

皮膚保護剤を貼付した後、ストーマと皮膚保護剤の間に散布します。

使用上の注意

- 本品の材質が肌に合わないときは使用を控え、医師または看護師に相談して下さい。
- 使用後は必ずふたをしてください。

コンバテックでは、上記以外にもさまざまなオストミー製品をご用意しております。製品についての情報からストーマケアのご相談まで何でもお気軽にお問い合わせください。

ConvaTec 

輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号
お客様相談窓口

 **0120-532384**
<http://www.convatec.com>