

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แผ่นสโตมาฮีซีฟซีล

Stomahesive® Seal

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นสโตมาฮีซีฟซีลคือ วัสดุสำหรับปิดรอยรั่วระหว่างป็นและทวารเทียม ดูดซับความชื้นและบั้นขึ้นรูปได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผิวจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกาย

วัตถุประสงค์การใช้

ให้การปกป้องผิวหนังบริเวณรอบๆรูทวารเทียมและรูปัสสาวะเทียมด้วยการเติมเต็มผิวหนังที่ไม่เรียบ และการกดทับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของระบบทวารเทียม

ข้อบ่งใช้การใช้

สำหรับใช้กับผู้ป่วยโคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) อิลีออสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้เล็ก) หรือ ยูโรสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ)

ข้อบ่งใช้

แผ่นสโตมาฮีซีฟซีลสามารถใช้สำหรับการปกป้องผิว เช่น:

- ใช้แนบปิดรูทวารเทียมและรูปัสสาวะเทียม
- ใช้เป็นวัสดุอุดแนบภายนอกบนผิวหนังที่ไม่เรียบ

วิธีการใช้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวสะอาดและแห้ง
2. ดึงแถบหุ้มออกจากวัสดุปิดแนบทั้งสองด้าน
3. ค่อยๆ บัน ม้วน ยืด หรือบีบอัดวัสดุปิดแนบให้พอดีกับทวารเทียม อาจตัด นำมาซ้อนกัน หรือนำวัสดุปิดแนบมาติดกันใหม่เพื่อให้พอดีกับบริเวณที่ยากต่อการจัดการ
4. ค่อยๆ ทาและเกลี่ยวัสดุปิดแนบให้เรียบมาทางปากทวารเทียม ขณะใช้แรงกดเล็กน้อย ให้กดวัสดุปิดแนบไว้กับที่ประมาณ 30 วินาที
5. ติดตามการรั่วซึมบนพื้นผิวของวัสดุปิดแนบโดยตรงและจับไว้ให้เข้าที่เป็นเวลา 30 วินาทีโดยใช้แรงกดเบาๆ จนแน่น
6. ใส่ไว้ได้นานตามเท่าที่ยังรู้สึกสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หมายเหตุ: หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

วิธีการดึงออก

ค่อยๆ ดึงลอกระบบดูมเทียมออกจากร่างกาย สิ่งตกค้างใดๆ ที่หลงเหลืออยู่สามารถขจัดออกจากผิวหนังได้โดยการรีดม้วนและลอกออกหรือใช้สารทำความสะอาดชนิดไม่ทำใหระคายเคือง Sensi-Care™ หรือ Niltac™

การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ข้อบ่งชี้ในการกำจัดทิ้งในแต่ละประเทศ

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ห้ามใช้เพื่อปิดผิวหนังที่ปริแตกหรือแผลเปิด หรือโดยผู้ที่มีความรู้สึกไวหรือมีอาการแพ้หรือเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อผลิตภัณฑ์
- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีการระบายปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบขาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยเหล่านี้หลายๆ ครั้ง หากตรวจพบก่อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์นี้มิได้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) คุณสมบัตินี้ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป
- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้วัสดุปิดแนบและอุปกรณ์รูทวารเทียมเพื่อป้องกันทวารเทียมและผิวหนังโดยรอบจากการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บ

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 413503, 413504, 413505 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น

©2015 ConvaTec Inc.

®/™ แสดงถึงเครื่องหมายการค้าของ ConvaTec Inc.

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT หมายถึง รุ่นการผลิต

EXP. DATE หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เฟลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000