

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสเซนต้า แผ่นปกป้องผิวหนัง

Esenta Sting Free Skin Barrier Wipes

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปกป้องผิวหนังชนิดไม่ระคายเคือง สำหรับใช้บริเวณรอบทวารเทียมและรอบบาดแผล

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับปกป้องผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากของเสีย เอ็มไซม์ และคราบขาว

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวให้แห้ง
2. ฉีกซองบรรจุและคลี่แผ่นออก
3. เช็ดบริเวณผิวหนังที่ต้องการปกป้องให้ทั่ว และทิ้งไว้สักครู่ให้แห้ง

ข้อควรระวัง

สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรใช้ซ้ำ หากใช้ซ้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและคุณสมบัติอาจไม่เป็นไปตามข้อบ่งใช้

หลังการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพ ให้จัดการและกำจัดตามตกลงการปฏิบัติทางการแพทย์และกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้

หากในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานอุปกรณ์มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานระดับประเทศของคุณ

- หลีกเลี่ยงการใช้บนบาดแผลโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคืองและปรึกษาแพทย์
- สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือน: วัตถุไวไฟ

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งและพ้นจากแสงอาทิตย์

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 423282 ใน 1 กสอบรรจุ 30 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



เครื่องมือแพทย์



ผู้ผลิต



ผู้นำเข้า



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



คำเตือน



ระวังวัตถุไวไฟ



ห้ามใช้ซ้ำ



รุ่นการผลิต



หมายเลขแคตตาล็อก



วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000